

# Nébuliseurs à ultrasons

## 1. Caractéristiques :

<b>Caractéristiques</b>	<b>standard</b>	<b>Sur demande</b>	
Alimentation	230	110/230	Vac
Consommation	65		VA
Fréquence de la céramique	2,4	1 à 2,4	MHz
Classification appareil	Appareil de classe électrique 1 - type B		
Normes	NF EN 13544-1	CE et UL	
Granulométrie (MMAD)	4,2	4,2 à 12	µm
Température de stockage	-40 à +70	-40 à +70	°C
Température de fonctionnement	+10 à +40	-40 à +70	°C
Bruit	39		dBA
Débit de liquide	40 à 250	40 à 600	ml/h
Débit d'air	0 à 40	0 à 80	l/min
Masse inhalable	0,35		ml Naf 1%
Débit d'aérosol produit pour un volume de remplissage de 5ml	0,04		ml/min
Applications	Aérosolthérapie, humidification	Aérosolthérapie, humidification, désinfection	

*Dossier : Nébuliseur Caract.doc*

*Date :28/11/2005*

*p. 1/3*

*TELEMAQ Espace InCom 250 Route de Tiragon 06370 Mouans Sartoux  
Tel : 04 92280516 Fax : 04 93755308 Mail : [contact@telemaq.fr](mailto:contact@telemaq.fr)  
Siret : 425 039 625 00024 RCS Cannes France  
TVA : FR 52 425039625*



## 2. Fonctions :

- ❖ LED tricolore et buzzer :
  - vert : fonctionnement OK
  - rouge + buzzer : problème thermique
  - orange clignotant + buzzer : manque d'eau
  - rouge clignotant + buzzer : fin de temporisation
  
- ❖ Remplacement du canal sans maintenance :
  - Recherche automatique de la fréquence de fonctionnement de la céramique
  - A chaque démarrage de l'appareil
  
- ❖ Temporisation du temps de fonctionnement : 0 à 30 minutes
  
- ❖ Débit de liquide réglable : 40 à 250ml/h
  
- ❖ Débit d'air réglable : 0 à 40l/min
  
- ❖ Détection manque d'eau
  
- ❖ Réchauffeur thermique 20W (en option)

### 3. Fonctions sur demande :

- ❖ Temporisation programmable avec afficheur LCD
- ❖ Commande à distance de la nébulisation par radiofréquence
- ❖ Programmation de l'heure de démarrage
- ❖ Réglage automatique ventilation et nébulisation en fonction du volume de la pièce
- ❖ Surveillance état de la céramique